



EMIL

AK MedTec



AK MedTec

EVA

Quick Facts

VÉRIFICATION SYSTÈME

On/Off appuyer brièvement

- Voyant vert plein > Batterie pleine
- Voyant vert clignote > Batterie chargée entre 75 et 35%
- Voyant rouge plein > Batterie en dessous de 35% (pas de stress, il reste encore facilement 2 x45 minutes)
- Voyant rouge clignote > Problème système

MISE EN MARCHÉ

Appuyer 2 secondes sur On/Off

- Le système démarre en position chauffage maximum (40°C) 
- Appuyer une nouvelle fois pour régler à 36°C 
- Appuyer une nouvelle fois pour régler à 32°C 

FONCTIONNEMENT

- La température est atteinte après 2-3 minutes. Attention : uniquement si le patient est allongé sur le matelas (chaleur congestionnée)
- La température est surveillée par des capteurs
- Le système se coupe automat. au bout de 45 minutes

DURÉE DE FONCTIONNEMENT/CHARGEMENT DE LA BATTERIE

- A -10°C env. 3.5h durée de fonctionnement en position de chauffage maximum
- Durée de chargement d'une batterie vide env. 3h à 220 V

NETTOYAGE

- Lorsque le système est fermé, le dispositif est étanche à l'eau et aux projections d'eau



AK MedTec

ELMO



AK MedTec

EMMA



AK MedTec

Heated Medical Devices

Download
Notices
d'utilisation

