



# EMIL

AK MedTec



AK MedTec

# EVA

## Quick Facts




### SYSTEMCHECK

#### Ein/Aus kurz drücken

- grünes Dauerlicht > Akku voll
- grünes Licht blinkt > Akku zwischen 75 und 35%
- rotes Dauerlicht > Akku unter 35% (kein Stress, Laufzeit locker noch 2 x 45 Minuten)
- rotes Licht blinkt > System defekt

### STARTEN

#### 2 Sekunden Ein/Aus drücken

- System startet in höchster Heizstufe (40°C) 
- weiteres Mal drücken, regulieren auf 36°C 
- weiteres Mal drücken, regulieren auf 32°C 

### BETRIEB

- Temperatur wird nach 2 - 3 Minuten erreicht. Achtung: Nur wenn Patient auf der Auflage liegt (Stauungswärme)
- Temperatur von Sensoren überwacht
- nach 45 Minuten automatisches Ausschalten

### LAUFZEIT/LADEZEIT AKKU

- bei -10°C ca. 3 - 3,5 Stunden Laufzeit (beim durchschnittlichen 75-kg-Patienten) in der höchsten Heizstufe, bei kräftigerem Patienten entsprechend länger
- bei leerem Akku Ladezeit ca. 3 h mit 220V

### REINIGUNG

- wenn System geschlossen, wasser- und spritzwassergeschützt



AK MedTec

# ELMO



AK MedTec

# EMMA



AK MedTec

# Heated Medical Devices

**Download**  
Gebrauchsan-  
weisung

